

# WELLAND MEDICAL

**2-dílné sáčky Welland Flair®**



PPR-INS-X04/02

## Návod k použití

**Před použitím prosím návod důkladně přečtěte.**

### Volba správné velikosti

Pokud si nejste jistí velikostí Vašeho vývodu, použijte přiložený měřicí kalibr (obr.1).



obrázek 1

Položte měřicí kalibr na Váš vývod takovým způsobem, aby dobře přiléhala a odečtěte naměřený rozměr. Okolo Vašeho vývodu by měly zůstat ještě přibližně 1-2 mm volného prostoru.

Postupem času se může tvar a velikost Vašeho vývodu měnit, proto je nutné provádět pravidelná měření, aby byl Váš sáček vždy pevně usazen a aby neprosakoval.

### Příprava pokožky

Omyjte pokožku okolo Vašeho vývodu teplou vodou a neperfémovaným mýdlem.

Pokožku důkladně osušte, aby došlo k dokonalému přilepení sáčku.

### Přiložení podložky

Vyjměte podložku z ochranného kartónu a v případě potřeby ji zastříhnete tak, aby velikostí odpovídala Vašemu vývodu.

Sejměte ochranný papír ze zadní strany podložky a přiložte ji k pokožce (vertikálně nebo horizontálně).

Pokud používáte sáček s připevněným mikropórovým páskem, odstraňte po přiložení podložky ochrannou fólii a proveďte důkladné přitlačení.

### Přiložení dvoudílného sáčku Flair®

*Pokud používáte vyprazdnitelný sáček, dbejte na to, aby byla uzavřená integrovaná výpust'. Pokud používáte urostomický sáček, dbejte na to, aby byl uzavřený výpustní kohoutek.*

*K zajištění správné funkčnosti sáčku se ujistěte, že vnitřní stěny sáčku nejsou k sobě přilepené. Tím dojde k podpoře průchodu materiálu z vývodu do sáčku.*

**Aniž byste odstranili ochranný papír lepicího kroužku,** položte sáček opatrně na podložku a zarovnejte kroužek sáčku s kroužkem na podložce. Zatlačte jemně na kroužek sáčku, dokud nedojde k jeho slyšitelnému zaklapnutí. Sáčkem lze na podložce dle Vašich požadavků otáčet (obr.2).



obrázek 2

Jakmile jste s pozicí spokojeni, sejměte pomocí poutek krouživým pohybem ochranný papír. Uhladte prsty celou oblast okraje, aby došlo k zajištění důkladného utěsnění (obr.3).




obrázek 3

### Čištění integrované výpusti

#### Otevření a vyprázdnění sáčku



K otevření sáčku rozepněte suchý zip (obr.4).

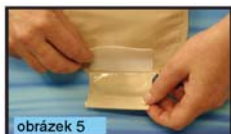

Rozvíňte výpust' téměř až ke koncové části. Spodní část přidržte rukou (obr.5).

Zatáhněte opatrně za poutko na konci výpusti. Tím dojde k otevření sáčku a vypuštění jeho obsahu do toalety (nebo lahve). Výpustní konec vyčistěte jemným hadrem nebo papírem (obr.6).



obrázek 6

#### Uzavření sáčku

Výpust' zaviňte směrem nahoru k suchému zipu.

Suchý zip překlopte dolů a sáček uzavřete (obr.7).



obrázek 7

#### Odvzdušnění dvoudílného sáčku

Pokud se v sáčku nahromadí příliš velké množství vzduchu, odtáhněte sáček mírně od podložky, čímž dojde k vypuštění vzduchu. Poté sáček opět pevně uzavřete.

#### Zlikvidování dvoudílného sáčku

**Pokud chcete sáček vyprázdnit nebo vyměnit, není nutné pokaždé odstraňovat podložku. Podložka může zůstat připevněná i několik dní.**

Pomocí umělohmotného poutka sáček nadzdvihněte a stáhněte směrem dolů z podložky. Před přiložením nového sáčku podložku důkladně vyčistěte a vysušte.

K odstranění podložky stáhněte pomalu pomocí poutka směrem shora dolů lepicí kroužek.

K usnadnění sejmutí podložky zatlačte rukou na břicho, čímž dojde k zamezení podráždění pokožky.

#### Zlikvidování dvoudílného sáčku

Obsah sáčku vypusťte do toalety a sáček zlikvidujte jako domovní odpad.

Nepokoušejte se sáček spálit, jelikož by mohlo dojít ke vzniku jedovatých plynů.

#### Další rady

##### Použití krytek filtru

Krytky filtru slouží k tomu, aby nedocházelo k úniku plynu ze sáčku. Malé množství plynu může zabránit „pevnému usazení“ stolice nahoře v sáčku, což občas způsobuje prosakování.

Krytky filtru zabraňují vniknutí vody do filtru a mohou tak být použity při koupání, sprchování nebo plavání.

**Přiložení:** Sejměte krytku filtru z voskového papíru a přiložte ji vpředu na sáčku přes otvor filtru.