

DOPLŇKY WELLAND

Pásky a přídržné prostředky: maximálně 2 ks ročně, nejvýše do 600 Kč / 2ks

Název výrobku	velikost	kód SÚKL	ks/bal.
WELLAND STOMICKÝ PÁSEK XBLTS01, XBLTL01 pouze k sáčkům AURUM CONVEX a PROFILE a dvoudílnému systému	120 cm	5003039	1
	145 cm	5003042	1

Plně hrazeno ZP

Prostředky pro odstranění stomické podložky - silikonové: 500 Kč / 1 měsíc

Název výrobku	velikost	kód SÚKL	ks/bal.
ODSTRAŇOVAČ LEPU VE SPREJI na silikonové bázi, 50 ml WAS040	Snadné odstranění podložky z pokožky	5003237	1

Plně hrazeno ZP

Prostředky ochranné: 1.000 Kč / 1 měsíc

Název výrobku	velikost	kód SÚKL	ks/bal.
WELLAND BARIÉROVÝ FILM WBF® roušky, WBF050	Pro lepší přilnavost podložek	5003679	50
WELLAND BARIÉROVÝ SPREJ 50 ml, WBS050	Bez alkoholu, chrání pokožku	5003681	1
WELLAND STOMICKÝ PUDR tuba 25g, WPP025	Ochrana porušené a mokvající pokožky	5003269	1

Plně hrazeno ZP

Prostředky čistící: 300 Kč / 1 měsíc

UBROUSKY ČISTÍCÍ roušky WAD050	Snadné odstranění lepivého filmu z pokožky	5003248	50
---	--	---------	----

Plně hrazeno ZP

Prostředky vyplňovací: lze předepsat pouze s podložkou - 1 podložka = 1 kroužek

HYPERSEAL KROUŽEK s manukovým medem těsnící, malý, XMHWA300	Vyrovnávací 50 x 2,5 mm	5003304	20
WELLAND STOMICKÁ PASTA BEZ ALKOHOLU tuba 100g WSP100	Vyrovnání kožních nerovností	5003295	1

Plně hrazeno ZP

Prostředky vyrovnávací: lze předepsat pouze s podložkou - 1 podložka = 2 půlkroužky

ULTRAFRAME® ULTRA TENKÉ PŘÍDRŽNÉ PŮLKROUŽKY XUFWAFH33	Ultra tenké vyrovnávací PRODYŠNÉ	5003320	20
HYDROFRAME® PŘÍDRŽNÉ PŮLKROUŽKY XWAFH33	Vyrovnávací	5003279	20
HYDROFRAME® PŘÍDRŽNÉ PŮLKROUŽKY s manukovým medem - XMHWAFH33	Vyrovnávací	5003309	20

Plně hrazeno ZP

Výrobce: **Welland Medical**
J+A zdravotnické potřeby, spol. s r.o.
Výhradní distributor, bezplatná zásilková a poradenská služba v oboru péče o stomie vedená certifikovanou stomasestrou.
Malé náměstí 104, 337 01 Rokycany
tel.: 371 722 983, **volejte zdarma: 800 100 644**
info@ja-zdravotnickepotreby.cz
www.ja-zdravotnickepotreby.cz

Všechny vyobrazené produkty jsou registrovaným zdravotnickým prostředkem určeným pacientům se stomií. Stomické sáčky jednodílné i dvoudílné slouží k zachycování stolice nebo moči. Konkrétní užití a správný výběr pomůcky a doplňkového sortimentu určuje ošetřující lékař nebo stomická sestra. Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití.

Všechny produkty označené® jsou ochranné známky registrované a patří společnosti CliniMed (Holdings) Limited.

*Mnoho odborných studií v angličtině o účincích manukového medu lze nalézt také ve veřejně dostupných zdrojích na internetu. Mezinárodně uznávaný systém hodnocení UMFTH (Unique Manuka Factor) certifikuje novozélandská asociace UMFTH Honey Association.



OCHRANA A PÉČE
se širokou řadou doplňků pro stomiky

Welland
Medical

Zlepšovatelé v péči o stomie

ŘADA DOPLŇKŮ SLOUŽÍCÍ K OČIŠTĚNÍ A OŠETŘENÍ OKOLÍ STOMIE A K PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI POMŮCEK



ODSTRAŇOVAČ LEPU
nedráždivý, ve spreji nebo v rouškách

Snadno odstraňuje podložku z pokožky, je hypoalergenní, nevysušuje kůži.

Použití: při snímání přilepené pomůcky nastříkejte sprej nebo použijte roušku s roztokem v místě odlepování od těla. Po sejmutí pomůcky očistěte okolí stomie rouškou.

Odstraňovač lepu ve spreji na silikonové bázi
balení 1 ks / 50 ml
kód SÚKL 5003237
Ubrousky čistící
balení po 50 ks
kód SÚKL 5003248

WELLAND BARIÉROVÝ FILM WBF® v rouškách
WELLAND BARIÉROVÝ SPREJ

Díky silikonové bázi obsažené ve vlhčených rouškách nebo ve spreji slouží k lepší přilnavosti pomůcek a jako ochranná vrstva při opakovaném používání stomických pomůcek.

Nezpůsobuje pálení ani podráždění. Perfektní použití na pokožce při inkontinenci, vhodné jako doplňková ochrana k urinálním kondomům.
Použití: potřete očistěnou pokožku, kterou chcete chránit, rouškou s roztokem nebo nastříkejte slabou vrstvu filmu, nechte krátce zaschnout a přiložte pomůcku.

WELLAND BARIÉROVÝ FILM WBF® v balení po 50 ks
kód SÚKL 5003679
WELLAND barierový sprej 50 ml
kód SÚKL 5003681



WELLAND STOMICKÁ PASTA
je hypoalergenní, neobsahuje alkohol

Pasta je určená k vyrovnání kožních nerovností kolem vývodu. Brání podtékání, které může vést k podráždění nebo poškození pokožky, zvyšuje přilnavost pomůcky.
Použití: z tuby vytlačíte potřebné množství pasty a navlhčenými prsty rozetřete v okolí stomie tak, aby pasta vytvořila rovný povrch pro připevnění stomického sáčku. Pasta může být odstraněna spolu se sáčkem pomocí odstraňovače lepu.

Pasta WELLAND bez alkoholu ve stlačitelné tubě 100 gr
kód SÚKL 5003295

WELLAND STOMICKÝ PUDR
Pomůcka je určena pro ochranu porušené a mokvající pokožky.

Absorbuje vlhkost a vytváří lepkavý gel, který umožní lepší přilnutí sáčku ke kůži. Mimo jiné obsahuje pektin a Aloe Vera, tím podporuje hojení kůže.
Použití: stlačením plastové nádoby rozprašte potřebné množství pudru na umytou a osušenou pokožku v okolí stomie. Přebytný pudr setřete a přilepte sáček.

WELLAND STOMICKÝ PUDR 25 gr
kód SÚKL 5003269



PŘÍDRŽNÉ PŮLKROUŽKY HYDROFRAME® a ULTRAFRAME®
Příjemný způsob zabezpečení sáčku rozšířením lepicího okraje sáčku nebo podložky.

Půlkroužky jsou vyrobeny ze 100% hydrokoloidu, který je šetrný vůči pokožce. Pomocí půlkroužků výrazně zvýšíte životnost pomůcky.
Použití: sejměte ochranný papír a pomůcku přilepte na požadované místo. Pokud půlkroužky nalepíte přes okraj již nalepené podložky, dosáhnete rozšíření lepicí plochy.

ULTRAFRAME® PŘÍDRŽNÉ PŮLKROUŽKY - ultra tenké - vyrovnávací - prodyšné
v balení po 20 ks **kód SÚKL 5003320**

HYDROFRAME® PŘÍDRŽNÉ PŮLKROUŽKY
v balení po 20 ks **kód SÚKL 5003279**

HYDROFRAME® PŘÍDRŽNÉ PŮLKROUŽKY s manukovým medem
v balení po 20 ks **kód SÚKL 5003309**



HYPERSEAL KROUŽEK s manukovým medem
Jsou ideální pro oblasti vývodů s prasklinami a jizvami, které potřebují vyrovnat.

Zabraňují podtékání a zabezpečují utěsnění. Použití též pro hrudní hadičky, chirurgické drenáže a drény. Vhodné též ke snížení rizika vzniku otlačenin, pro podrážděnou a odřenou pokožku.
Použití: sejměte ochranný papír, pomůcku dle potřeby upravte nůžkami a nalepte na požadované místo.

HYPERSEAL KROUŽEK s manukovým medem těsnící malý
velikost 5 cm, tloušťka 2,5 mm, v balení 20 ks
kód SÚKL 5003304



Obsažený manukový med lékařské kvality je produkt přírodního původu, který může pomoci podpořit zdravou kůži v okolí stomie.*



WELLAND stomický pásek
Doplňkové zabezpečení sáčků.

Přídržný pásek z pružného materiálu s nastavitelným zapínáním suchým zipem Velcro zajišťuje příjemné nastavení a použití a pocit bezpečí. Další typ pásků bez pěnového přitlačného kroužku pouze k sáčkům Aurum Convex a Profile a k podložkám dvoudílného systému.
Použití: pásek upevníme pomocí suchých zipů kolem pasu.

WELLAND STOMICKÝ PÁSEK
pouze k sáčkům AURUM CONVEX a PROFILE a dvoudílnému systému
120 cm - **kód SÚKL 5003039**, 145 cm - **kód SÚKL 5003042**

